

Reinigung und Desinfektion des HAMILTON-HF90

Infokarte

Bevor Sie fortfahren

Lesen Sie die Sicherheitsinformationen und überprüfen Sie Folgendes:

- Führen Sie die Reinigung und Desinfektion des Gerätes und seiner Teile mithilfe geeigneter Verfahren und Hilfsmittel durch, um Beschädigungen zu vermeiden und Kreuzkontaminationen zu reduzieren.
- Das Gerät muss vor der Reinigung und Desinfektion ausgeschaltet werden.


Vorbereitung des HAMILTON-HF90 für Reinigung und Desinfektion

1. Ziehen Sie den Beatmungsschlauch ab.




Beim Herausziehen des Schenkelanschlusses drücken Sie die Anschlussseiten zusammen.

2. Nehmen Sie die Befeuchterkammer heraus.

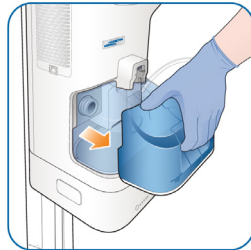


Ziehen Sie die Befeuchterkammer gerade nach vorne aus dem Gerät heraus.

3. Verschließen Sie den Gasauslass.

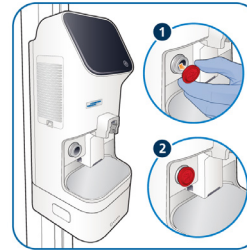

Verschließen Sie den Gasauslass mit der Schutzkappe.

4. Trennen Sie die Wasserzufuhr.

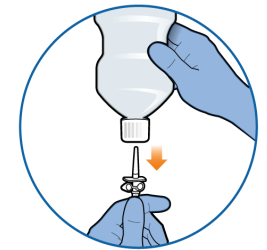

Ziehen Sie den Anstechdorn aus dem Wasserbehälter.

Verfahren und Mittel für Reinigung und Desinfektion

Die nachstehende Tabelle zeigt, wie und wann welche Gerätekomponenten zu reinigen sind. Die zugelassenen gebrauchsfertigen Reinigungs- und Desinfektionsmittel entnehmen Sie der Tabelle auf der rechten Seite.

Reinigungs- und Desinfektionsverfahren für das HAMILTON-HF90

| Teil | Häufigkeit | Reinigungs-/ Desinfektions- verfahren | Reinigungsmittel und Hinweise |
|---|--|--|---|
| Touchscreen- Bildschirm | Nach jedem Einsatz am Patienten und nach Bedarf während der Therapie | Wischen Sie das Teil mit einem Tuch ab, das mit einer zugelassenen Reinigungs-/Desinfektionslösung befeuchtet wurde. | <ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie keine Lösungen auf Basis von Essigsäure. • Verwenden Sie keine Tücher mit rauer Oberfläche. |
| Geräteoberflächen, einschließlich: <ul style="list-style-type: none"> • Gehäuse, einschließlich Filterabdeckungen • Netzkabel • Befestigungssysteme • Heizplatte | Nach jedem Einsatz am Patienten und nach Bedarf während der Therapie | Wischen Sie das Teil mit einem Tuch ab, das mit einer zugelassenen Reinigungs-/Desinfektionslösung befeuchtet wurde. | <p>Reinigen Sie nicht das Geräteinnere, um Schäden an inneren Teilen zu vermeiden.</p> <p>Wird das Teil während einer Therapie gereinigt, reinigen Sie weder die Befeuchterkammer noch das Beatmungsschlauchsystem.</p> <p>Beim Austausch eines Filters reinigen Sie die Filterabdeckung. Lassen Sie die Abdeckung komplett trocknen, bevor Sie sie wieder anbringen.</p> |
| Zubehör zum Fahrgestell, einschließlich: <ul style="list-style-type: none"> • Fahrgestell • Halterungssystem für Sauerstoffflaschen | Nach jedem Einsatz am Patienten und nach Bedarf während der Therapie | Wischen Sie das Teil mit einem Tuch ab, das mit einer zugelassenen Reinigungs-/Desinfektionslösung befeuchtet wurde. | |

Reinigungs- und Desinfektionsmittel für das HAMILTON-HF90

| Reinigungs-/Desinfektionsmittel | Konzentration |
|--|-----------------|
| Von der EPA zugelassene Reinigungs-/Desinfektionsmittel | |
| CaviWipes (Metrex) | Gebrauchsfertig |
| Zugelassene Reinigungs-/Desinfektionsmittel | |
| CaviWipes (Metrex) | Gebrauchsfertig |
| mikroZid universal wipes (Schülke) | Gebrauchsfertig |
| Environmental Cross® V-Lock (Hakuzo Medical) | Gebrauchsfertig |
| Incidin OxyWipes S (Ecolab) | Gebrauchsfertig |
| Sani-Cloth active (Ecolab) | Gebrauchsfertig |