

# Limpeza e desinfecção do HAMILTON-HF90

## Cartão de referência rápida

### Antes de proceder

Revise as informações de segurança e:

- Use o método e os materiais apropriados durante a limpeza e desinfecção do dispositivo e de seus componentes, pois isso evitará danos ao equipamento e limitará a contaminação cruzada.
- Verifique se o dispositivo está desligado antes de iniciar o procedimento.


### Preparação do HAMILTON-HF90 para limpeza e desinfecção

1. Desconecte o circuito respiratório.




Aperte as laterais do conector de alça enquanto o puxa para fora do dispositivo.

2. Remova a câmara de umidificação.

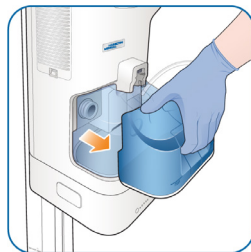


Puxe a câmara direto para fora do dispositivo.

3. Cubra o adaptador da saída de gás.

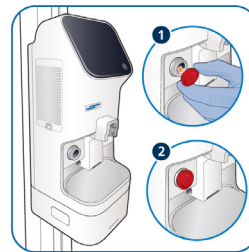

Cubra o adaptador da saída de gás com a tampa protetora.

4. Desconecte o fornecimento de água.

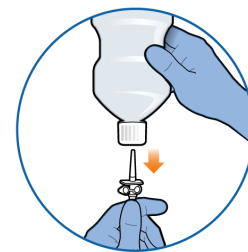

Retire o grampo de alimentação de água do reservatório de água.

## Métodos e agentes para a limpeza e desinfecção

A tabela abaixo lista os componentes aplicáveis do dispositivo, além de como e quando limpá-los. Os agentes de limpeza e desinfecção aprovados estão listados na tabela à direita e estão prontos para uso.

### Métodos para limpeza e desinfecção do HAMILTON-HF90

Peça	Frequência	Método para limpeza/ desinfecção	Agentes de limpeza e comentários
Monitor com tela de toque	Após utilizar em cada paciente e conforme necessário, durante o tratamento.	Limpe com um pano umedecido usando uma solução de limpeza/ desinfecção registrada e aprovada.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Não use soluções à base de vinagre.</li><li>• Evite usar panos sujos.</li></ul>
Parte externa do dispositivo, incluindo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Invólucro, incluindo tampas de filtro</li><li>• Cabos elétricos</li><li>• Sistemas de montagem</li><li>• Placa aquecedora</li></ul>	Após utilizar em cada paciente e conforme necessário, durante o tratamento.	Limpe com um pano umedecido usando uma solução de limpeza/ desinfecção registrada e aprovada.	Não limpe o dispositivo por dentro para evitar danos nos componentes internos. Ao limpar durante o tratamento, não limpe a câmara de umidificação ou o circuito respiratório. Ao substituir um filtro, certifique-se de limpar a tampa do filtro. Deixe a tampa secar completamente antes de recolocá-la.
Acessórios relacionados ao carrinho, incluindo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Carrinho</li><li>• Sistema para prender o cilindro de O2</li></ul>	Após utilizar em cada paciente e conforme necessário, durante o tratamento.	Limpe com um pano umedecido usando uma solução de limpeza/ desinfecção registrada e aprovada.	

### Agentes para limpeza e desinfecção do HAMILTON-HF90

Agente de limpeza/desinfecção	Concentração
<b>Agentes de limpeza/desinfecção registrados na EPA</b>	
CaviWipes (Metrex)	Pronto para uso
<b>Agentes de limpeza/desinfecção aprovados</b>	
CaviWipes (Metrex)	Pronto para uso
Lenços mikrozid universal (Schülke)	Pronto para uso
Environmental Cross® V-Lock (Hakuzo Medical)	Pronto para uso
Incidin OxyWipes S (Ecolab)	Pronto para uso
Sani-Cloth active (Ecolab)	Pronto para uso