

# Nettoyage et désinfection du HAMILTON-HF90

## Carte de référence rapide

### Avant de commencer

Consultez les informations relatives à la sécurité et vérifiez les points suivants :

- Utilisez la méthode et les produits appropriés pour nettoyer et désinfecter le dispositif et ses composants, afin d'éviter d'endommager l'équipement et de limiter toute contamination croisée.
- Assurez-vous que le dispositif est mis hors tension avant de commencer la procédure.


### Préparation du HAMILTON-HF90 pour le nettoyage et la désinfection

1. Déconnectez le circuit respiratoire.




Pincez les côtés du connecteur de branche tout en le sortant du dispositif.

2. Retirez le réservoir d'humidification.

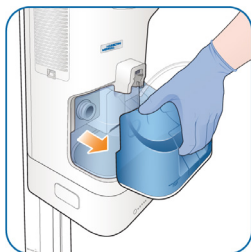


Sortez le réservoir directement du dispositif.

3. Protégez l'adaptateur de sortie de gaz.

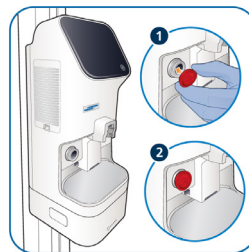

Protégez l'adaptateur de sortie de gaz avec le capuchon de protection.

4. Déconnectez l'alimentation en eau.

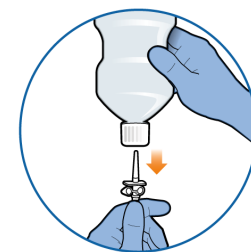

Sortez la pointe de la ligne d'alimentation en eau de la poche d'eau.

## Méthodes et produits de nettoyage et de désinfection

Le tableau ci-dessous répertorie les composants du dispositif et indique comment et quand les nettoyer. Les produits de nettoyage et de désinfection approuvés sont répertoriés dans le tableau ci-contre et sont prêts à l'emploi.

### Méthodes de nettoyage et de désinfection du HAMILTON-HF90

Pièce	Fréquence	Méthode de nettoyage/désinfection	Produits de nettoyage et remarques
Écran tactile	Après chaque utilisation sur un patient ou si besoin pendant la thérapie.	Essuyez à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution approuvée et homologuée de nettoyage/désinfection.	<ul style="list-style-type: none"> <li>N'utilisez aucune solution à base de vinaigre.</li> <li>Évitez d'utiliser un tissu rugueux.</li> </ul>
Extérieur du dispositif, y compris : <ul style="list-style-type: none"> <li>Boîtier, y compris caches de filtre</li> <li>Câbles d'alimentation</li> <li>Systèmes de montage</li> <li>Plaque chauffante</li> </ul>	Après chaque utilisation sur un patient ou si besoin pendant la thérapie.	Essuyez à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution approuvée et homologuée de nettoyage/désinfection.	<p>Ne nettoyez pas l'intérieur du dispositif pour ne pas endommager les composants internes.</p> <p>Lorsque vous procédez au nettoyage pendant la thérapie, ne nettoyez pas le réservoir d'humidification ni le circuit respiratoire.</p> <p>Lorsque vous remplacez un filtre, veillez à bien nettoyer le cache du filtre. Laissez-le sécher complètement avant de le remettre.</p>
Accessoires relatifs au chariot, y compris : <ul style="list-style-type: none"> <li>Chariot</li> <li>Système de support pour bouteille d'oxygène</li> </ul>	Après chaque utilisation sur un patient ou si besoin pendant la thérapie.	Essuyez à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution approuvée et homologuée de nettoyage/désinfection.	

### Produits de nettoyage et de désinfection du HAMILTON-HF90

Produit de nettoyage/désinfection	Concentration
<b>Produits de nettoyage/désinfection homologués par l'EPA</b>	
CaviWipes (Metrex)	Prêt à l'emploi
<b>Produits de nettoyage/désinfection approuvés</b>	
CaviWipes (Metrex)	Prêt à l'emploi
mikrozid universal wipes (Schülke)	Prêt à l'emploi
Environmental Cross® V-Lock (Hakuzo Medical)	Prêt à l'emploi
Incidin OxyWipes S (Ecolab)	Prêt à l'emploi
Sani-Cloth active (Ecolab)	Prêt à l'emploi